


План ухода и чистки


Когда?	Что?	Как?
--------	------	------

По утрам

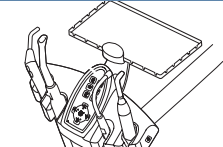

- Промывка шлангов инструментов (внутри) и водопроводящих систем
- ▶ Промывайте все места отбора в течение 2 минут
- Промывка всасывающих шлангов (внутри) и системы отсоса
- ▶ Прогоните через каждый всасывающий шланг по чашке холодной воды

После каждой процедуры лечения

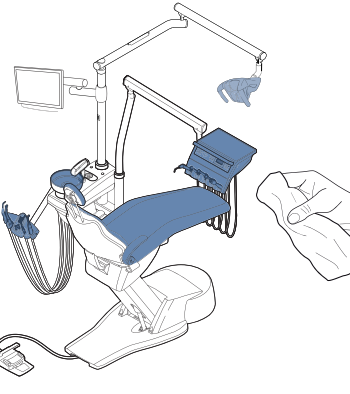


- Промывка шлангов инструментов (внутри) и водопроводящих систем
- ▶ Промывайте все места отбора в течение 20 секунд
- Промывка всасывающих шлангов (внутри) и системы отсоса
- ▶ Прогоните через каждый всасывающий шланг по чашке холодной воды.
При необходимости дезинфекции: проведите отсос дозы геля DEKASEPTOL из дозатора
- Очистка и дезинфекция
 - Всасывающих шлангов (снаружи) и шлангов инструментов (снаружи)
 - Плевательницы и ситечка
 - Поверхностей приборов, мягкой обивки и лампы
 - KaVo Screen One
 - ERGOcam One
- ▶ Очистите вручную и дезинфицируйте протиранием
- Очистка и дезинфекция
 - Ручек на модуле врача и стоматологической лампы KaVoLUX 540 LED
 - Ручек стоматологических ламп EDI и MAIA
- ▶ Снимите белые ручки и проведите их термодезинфекцию. Снимите и стерилизуйте серые ручки
- ▶ Снимите и стерилизуйте ручки

По вечерам




- Промывка шлангов инструментов (внутри) и водопроводящих систем
- ▶ Промывайте все места отбора в течение 20 секунд
- Вставок-ситечек
- ▶ Осмотрите и, при необходимости, замените
- Очистка и дезинфекция
 - Всасывающих шлангов (внутри)
 - Системы отсоса
 - Плевательницы
- ▶ Прогоните через каждый всасывающий шланг по чашке холодной воды.
Прогоните через каждый всасывающий шланг дозу геля DEKASEPTOL, уложите шланги
- ▶ Положите дозу геля DEKASEPTOL в плевательницу и почистите ее щеткой

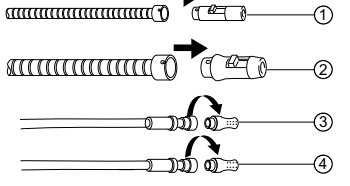


- Всасывающих шлангов (снаружи) и шлангов инструментов (снаружи)
- ▶ Очистите вручную и дезинфицируйте протиранием
- Соединительных элементов для всасывающих шлангов
- ▶ Снимите наконечники ① и ② и проведите их термодезинфекцию, наконечники ③ и ④ продезинфицируйте протиранием

Каждую пятницу и после длительного простоя

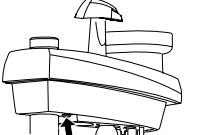

- Очистка и дезинфекция
 - шлангов инструментов (внутри)
 - водопроводящих систем
 - всасывающих шлангов снаружи
 - системы отсоса
 - плевательницы
- ▶ Проведите интенсивную ручную стерилизацию.
- ▶ Прогоните через каждый всасывающий шланг по чашке холодной воды.
При необходимости дезинфекции: проведите отсос дозы геля DEKASEPTOL из дозатора
- ▶ Положите дозу геля DEKASEPTOL в плевательницу и почистите щеткой

При необходимости

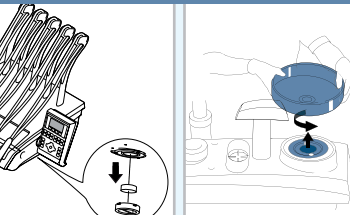

- Рециркуляционного фильтра турбины
- ▶ Осмотрите, при необходимости замените и очистите впуск фильтра
- Коврика для укладки инструментов/противоскользящего коврика
- ▶ Снимите и подвергните термодезинфекции
- Опоры стакана для полоскания
- ▶ Снимите, очистите вручную и проведите дезинфекцию протиранием
- Подставки для инструментов
- ▶ Снимите, очистите вручную и проведите дезинфекцию протиранием

ОСТОРОЖНО

Используйте только те средства дезинфекции, которые были одобрены компанией KaVo!

План ухода и чистки касается только самых необходимых эксплуатационных функций. Он не является заменой поставляемому с оборудованием руководству по эксплуатации, которого следует придерживаться во избежание неисправностей и аварийных случаев.

- Разрешенные дезинфицирующие средства:
- MikroZid Liquid (фирма Schülke & Mayr)
 - FD 322 (фирма Dürr)
 - Incidin Liquid (фирма Ecolab)
 - CaviCide (фирма Metrex)

